

Chi siamo

COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS
con sede a Verona -130 dipendenti
specializzata nella produzione e vendita di
abbigliamento e accessori.

In seguito all'emergenza Covid-19,
Quid riconverte la produzione per realizzare mascherine in
tessuto, implementando il coordinamento di una decina di
altre cooperative e realtà produttive
appartenenti al sistema LEGACOOP



Il prodotto

Mascherina facciale ad uso **medico**
a 1 strato, **Tipo I**, in cotone con elastici,
lavabile fino a 15 volte.

Approvata dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il tessuto ha un **trattamento**
antimicrobico e anti-goccia.



Quid
PINO

Prodotto conforme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993

Le mascherine che rientrano nel **Tipo I** sono maschere facciali ad uso medico che dovrebbero essere utilizzate da pazienti e da altro personale per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione in caso di epidemia e pandemia.

Si tratta di un dispositivo che copre la bocca e il naso, fornendo una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.

Le mascherine chirurgiche sono in regola con il parere ISS e sono equiparabili, nel periodo di emergenza, ad un DPI secondo quanto indicato dall'art 16. comma 1, del "Cura Italia". Sono consigliate come DPI, in questo periodo di emergenza, per tutti (civili e lavoratori); sconsigliate nell'ambito delle attività sanitarie a contatto con pazienti infetti dove sono richiesti DPI facciali filtranti FFP2 e FFP3"



Istituto Superiore di Sanità

Gruppo di Lavoro "Dispositivi Medici COVID-19"

Prot. N. 13289/ON373/ON.12

**COOPERATIVA SOCIALE QUID Onlus
Verona**

Email pec: quidcoop@pec.it

Risposta al N. _____ del 14/04/2020

Allegati _____

OGGETTO: Valutazione maschere facciali ad uso medico; richiesta ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 – Proponente COOPERATIVA SOCIALE QUID Onlus
RIF. COV 657

Con riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 si trasmette l'allegata dichiarazione riportante parere **FAVOREVOLE ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE** del prodotto Maschera ad uso medico a 1 strato, in tessuto cotone, con elastici, lavabile, non sterile - Tipo I, per l'utilizzazione dello stesso secondo la destinazione d'uso prevista, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Rimane inteso che l'efficacia giuridica amministrativa della dichiarazione allegata è condizionata all'effettiva ed assoluta rispondenza del prodotto alla vigente normativa tecnica, certificata, con assunzione di unilaterale responsabilità, dal Proponente.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro
"Dispositivi Medici COVID-19"
(Dott.ssa Roberta Marcoaldi)



Caratteristiche

in singolo tessuto di cotone
con piccole pieghe laterali
rifinita con orlo
elastici laterali
nasello in alluminio

Forma rettangolare di misura finita L 170 mm x H 90 mm (+ 5 mm)
con ampiezza centrale di apertura 170 mm (+ 5 mm)

Indicazioni di lavaggio:

Lavare per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 gr di ipoclorito di sodio (candeggina), sciacquare sotto acqua corrente, quindi lasciare asciugare completamente all'aria, per poi stirare a massima temperatura su ambo i lati il prodotto.
Lavare fino a 15 volte

Ogni mascherina è accompagnata da istruzioni per l'uso che spiegano le condizioni di corretto utilizzo e di lavaggio
Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Dopo l'utilizzo, non disperdere nell'ambiente e smaltire in conformità alla legge vigente per i rifiuti potenzialmente infetti



Trattamenti tessuto

TRATTAMENTO ANTIMICROBICO

- TECNOLOGIA NON MIGRANTE. NESSUNA MIGRAZIONE DI SOSTANZE VERSO LA PELLE E NE VERSO L'AMBIENTE
- TECNOLOGIA AD AMPIO SPETTRO DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEI MICROORGANISMI
- TRATTAMENTO SOLIDO ALLE MANUTENZIONI E STABILE NEL TEMPO
- FRESCHEZZA : PREVIENE LA FORMAZIONE DI ODORI
- NON CONTENGONO LE SOSTANZE PRESENTI NELL'ELENCO SVHC CANDIDATE LIST OF ECHA

TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Il trattamento garantisce l'idrorepellenza del tessuto su entrambi i lati limitando il passaggio di gocce e di salivazione dall'utente all'ambiente e viceversa

Etichetta e Confezione

Ogni mascherina è inserita in una **polybag singola**.

100 mascherine sono inserite in polybag grande.

In alternativa, **50 mascherine sfuse** in una scatola di cartone

Un cartone contiene 1.500 pz.

Ogni mascherina è accompagnata da **un flyer** che spiega le condizioni di corretto utilizzo. (vedi pagina seguente)

CODICE EAN A 13 NUMERI

Mascherina in tessuto di cotone ed elasthan

REF MOD. PMS702 Confezione pz. 1

Mascherina ad uso medico a 1 strato, Tipo I, in Tessuto cotone, con elastici, lavabile, non sterile, conforme a UNI EN 14683

 COOPERATIVA SOCIALE
QUID Via della Consortia 4,
Verona
Made in Italy

 XX.XXXX  LOT XXXX
 XX.XXXX

97% COTONE / COTTON
3% ELASTAN



INDICAZIONE DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA

Dispositivo riutilizzabile fino a 15 volte a seguito di lavaggio per immersione in soluzione di 1 litro di acqua con 5 grammi di ipoclorito di sodio (es. candeggina), sciacquare sotto acqua corrente, quindi lasciare asciugare completamente all'aria, per poi stirare a massima temperatura su ambo i lati il prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini



Indicazioni di corretto utilizzo

ISTRUZIONI PER L'USO. MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO

DESCRIZIONE

Mascherina facciale ad uso medico a 1 strato in cotone ed elasthan coprente naso e bocca, elastici, non sterile, per uso multiplo. Latex free.

INDICAZIONI D'USO

Mascherina facciale ad uso medico: dispositivo che copre bocca e naso (figura B) per fornire una barriera e ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.

Prodotto conforma a UNI EN 14683, tipo I.

Il prodotto non è sterile.

COMPOSIZIONE: 97% Cotone 3%Elastan

Codice: PMS702.

Lot. XXXX

Data di produzione: X.XXXX

Data di scadenza: X.XXXX

AVVERTENZE

Dispositivo ad uso individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contaminazione, occorre sostituire la mascherina o seguire le indicazioni di lavaggio.

Conservare in luogo asciutto.

Figura A

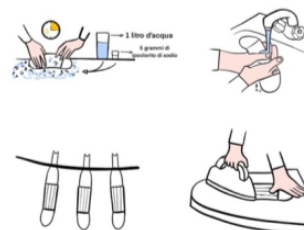


Figura B



Le mascherine che rientrano nel Tipo I sono maschere facciali ad uso medico che dovrebbero essere utilizzate solo da pazienti e da altro personale per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione in caso di epidemia e pandemia. Non sono destinate ad essere utilizzate da professionisti sanitari in sala operatoria o in ambienti con requisiti assimilabili

Condizioni Commerciali

quantità	prezzo iva escl
da 0 a 3000	3,90
da 3000 a 10000	3,85
oltre 10000	da concordare

Ordine multipli di 100 pz

Spese di spedizione a carico del cliente


Data di consegna 2/3 gg dal ricevimento del bonifico

Pagamento all'ordine.

Da concordare per ordini superiori a 3.000 pezzi

Inviare gli ordini a chantal.marchetti@progettoquid.it



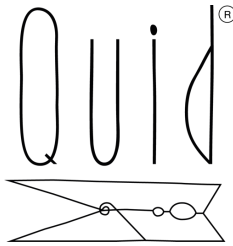

Press release Quid
16/04/2020


LE MASCHERINE QUID OTTENGONO LA CERTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Dopo la chiusura resa necessaria dall'entrata in vigore del decreto del 22/03/2020, Quid ha riaperto **riconvertendo la produzione** nella creazione di diverse tipologie di **mascherine protettive**, una delle quali ha oggi ricevuto ufficialmente la certificazione da parte dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità): si tratta di **Co-ver** – la mascherina protettiva riutilizzabile certificata, da filiera Made-in-Italy, nata da un progetto di rete per iniziativa di Quid Cooperativa Sociale con il sostegno di Legacoop.

Inizialmente, infatti, il progetto di produzione di mascherine è stato organizzato e sostenuto da **Legacoop (grazie anche a un finanziamento iniziale di Coopfond)**, in un progetto che ha visto Quid come coordinatore di una produzione mirata a rispondere alle necessità di **cooperative e aziende** ancora in attività, per la protezione dei propri dipendenti.

Nella fattispecie, il prodotto oggi approvato è una **maschera facciale ad uso medico, di tipo I in deroga**, in **cotone**, non sterile, con nasello, **riutilizzabile e lavabile fino a 15 volte**. Il tessuto utilizzato ha sostenuto un **trattamento anti-goccia e anti-microbico**. La mascherina è costituita da 1 strato di tessuto (97% cotone 3% elasthan), con cucitura lungo il perimetro (misura finita L170mmxH90mm) e **plissettature** sui lati corti, orientate dall'alto verso il basso per evitare l'accumulo di polvere e goccioline e per dare ampiezza alla mascherina, evitando l'eccessivo appoggio al volto durante la respirazione. I lati corti sono rigirati e bloccati con una cucitura, nella quale vengono fissati ulteriormente gli **elastici**: questa doppia fermatura garantisce la loro tenuta. Il dispositivo è inoltre fornito di **nasello in lega di alluminio-magnesio**, per una migliore aderenza al viso. La mascherina copre dunque la bocca e il naso, fornendo una barriera per ridurre al minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi.

Questa tipologia di mascherina è **riutilizzabile**, per un minor impatto ambientale, e **certificata lavabile fino a 15 volte**. La procedura di lavaggio prevede l'immersione in una soluzione di 1 litro

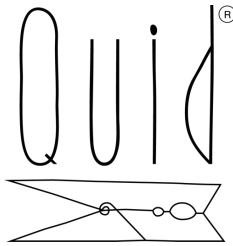

Press release Quid

16/04/2020

di acqua con 5 grammi di ipoclorito di sodio: il dispositivo dovrà poi essere sciacquato sotto acqua corrente, asciugato completamente all'aria e infine stirato alla massima temperatura su ambo i lati. Dopo l'utilizzo, dovrà essere smaltito in conformità alla legge vigente per i rifiuti potenzialmente infetti.

Le mascherine **Co-ver** saranno disponibili dalla prossima settimana per l'**acquisto online**, all'indirizzo <https://bit.ly/MascherineFaccialiLavabiliQuid>, in pack da **6, 50 o 100 pezzi**; per ordini superiori ai **300 pezzi**, scrivere all'indirizzo e-mail commerciale2@progettoquid.it.

Per ottenere questa importante certificazione, Quid ha dovuto implementare e affinare un Sistema Qualità, dimostrando la **tracciabilità dei prodotti** e incontrando gli **standard specifici di produzione** richiesti dall'ISS. Dalle autorizzazioni rilasciate fino a oggi, Quid risulta essere la **6ª azienda in Italia** su 268 proponenti a ricevere il placet per la creazione di mascherine, oltre ad essere con ogni probabilità una delle prime per le mascherine in **tessuto lavabile**. I dispositivi sono creati internamente a Quid, dalla cooperativa esterna Art Lining e da altre realtà del territorio che hanno dimostrato di mantenere gli stessi standard qualitativi richiesti.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato”, commenta **Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid**: “ci siamo impegnati duramente in queste settimane per trovare il tessuto adatto, svolgere i test necessari e adattare i campioni alle normative richieste (UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993). Un **team interno creato appositamente**, coordinato dal fondamentale lavoro del project manager Marco Penazzi e supportato dagli altri dipartimenti, ha lavorato giorno e notte per conseguire questo importante obiettivo. Desideriamo anche ringraziare gli attori impegnati sul territorio che ci hanno supportato, a partire da **Legacoop** nella fase di avvio e **Confindustria**. Oggi siamo felicissimi di poter presentare e produrre queste mascherine in tessuto, riutilizzabili più volte, come prodotto certificato”.

Quid – la moda come innovazione sociale.

Quid è una cooperativa sociale fondata nel 2013 e riconosciuta a livello europeo come innovatore sociale. La cooperativa, di tipo B, è un laboratorio sartoriale con sede in provincia di Verona ed occupa persone, prevalentemente donne, in condizioni di svantaggio o fragilità, creando opportunità d'impiego stabile, formazione e crescita lavorativa; in quest'ottica ha aperto anche due laboratori all'interno del carcere di Montorio (Verona). La produzione impiega tessuti di fine serie, stock invenduti o donati da prestigiose aziende tessili italiane e da noti brand del mondo della moda internazionale. Questa peculiarità produttiva evita di destinare al macero tessuti pregiati, consentendo un ridotto impatto ambientale. L'idea imprenditoriale, nata dal duplice obiettivo di creare inclusione sociale e lavorativa, è valsa alla cooperativa il riconoscimento di prestigiosi premi anche a livello internazionale: tra questi, European Social Innovation Competition (2014), European Civil Society Prize (2017), Lighthouse Activity nella categoria “Women for Results” di Momentum for Change assegnato dalle Nazioni Unite - UNFCCC (2017).

info: www.quidorg.it - e-shop: shop.progettoquid.com - contatti: digital@progettoquid.it