

Dati tecnici: Dispositivo di protezione facciale tipo "chirurgico"

Nome:	Dispositivo di protezione facciale di tipo chirurgico monouso
Prodotto:	Dispositivo di tipo facciale multi strato – MONOUSO-
Modello:	Frontale con fissaggi laterali ad elastici
Matricola:	0118 - 0119
Revisione:	00 - 25/03/2020
Anno di produzione:	2020
Direttiva:	(UE) 2016/425 D.Lgs 81/08 DL 17 Marzo 2020 n° 18 art 15 comma 3 / UNI EN 149:2009
Fabbricante:	Vestinvoga S.r.l.
Uso previsto:	Protezione personale per trattenuta delle particelle emesse dell'utilizzatore.
Descrizione:	Dispositivo di protezione a barriere di tipo chirurgico MONOUSO

Procedura di certificazione

Il dispositivo è prodotto in rispondenza alla norma UNI EN 149:2009 per quanto applicabile

1. Controllo interno della fabbricazione del dispositivo

Valutazione dei rischi

VR RESS/Norme

La valutazione dei rischi è effettuata in base a quanto indicato dalla norma UNI EN 149:2009 per quanto applicabile in relazione alla tipologia di dispositivo realizzato.

UNI EN 149: 2009

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Semimaschere filtranti antipolvere Requisiti, prove, marcatura

Requisiti applicabili sui dispositivi a barriera di tipo chirurgico:

8.4 – Prove di impiego

8.4.1 Generalità

8.4.2 Prova in movimento

8.4.3 Prova di simulazione in lavoro



Vedi allegati dati dei componenti utilizzati.

Progetto:

Prodotto:

Mascherine a barriera chirurgiche

Dispositivi di protezione monouso

Anno: 2020

-

Mod.: Multistrato ad elastici

Matricola: 0118 - 0119

Rev.: 00

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE TIPO CHIRURGICO

Premessa: Il dispositivo di protezione a tipo "chirurgico", è atto a trattenere le sole particelle emesse da chi la indossa. Non ha funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni e aerosol di natura chimico/organica:

Viene utilizzato per evitare che chi la indossa possa propagare virus attraverso starnuti e/o colpi di tosse

E' più comodo da indossare in quanto veste in maniera più larga sul volto

E' UN DISPOSITIVO MONOUSO

Punto 1 - Controllo della confezione

I dispositivi sono forniti in confezione monouso trasparente per permettere di controllare lo stato di conservazione della stessa.



Verificare l'integrità della confezione e del dispositivo in essa contenuta prima di procedere al suo utilizzo

Punto 2 - Pulizia delle mani

Prima di toccare il dispositivo pulito, lava con cura le mani con acqua e sapone.


Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.

Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.




Punto 3 - Controllo del dispositivo

Una volta che hai preso un dispositivo (non ancora utilizzato) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se il dispositivo è difettoso, buttalo via e prendine una nuova

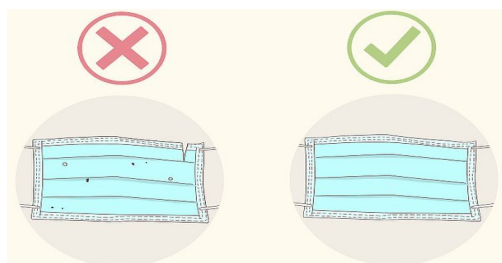


Punto 4 - Orientamento dispositivo

Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore del dispositivo è sagomabile, ma comunque rigida; (provvisto di ferretto all'interno della cucitura superiore) Assicurati che questo lato sagomabile sia rivolto verso l'alto prima di applicare il dispositivo sul tuo viso.

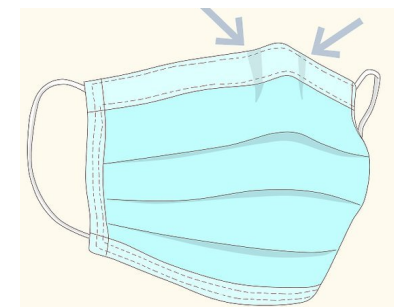


La parte interna del dispositivo è da considerarsi quella dove sono evidenti i punti di attaccatura dell'elastico

Dispositivo tipo 1

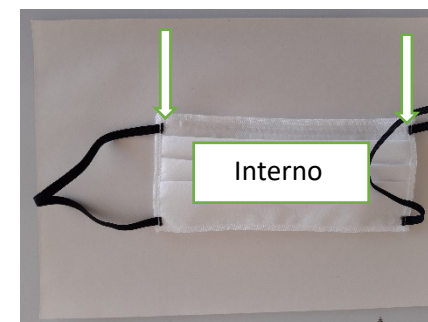

Dispositivo tipo 2

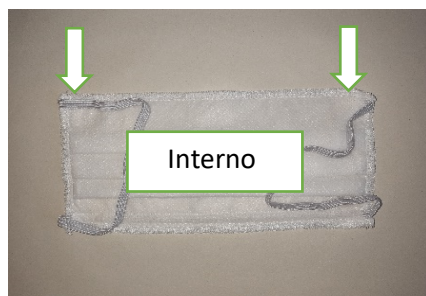


Punto 5 – Indossa il dispositivo

I dispositivi hanno due anelli, di materiale elastico, uno su ogni lato in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di dispositivo per gli anelli, mettilne uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.



Punto 6 – Sistema il dispositivo sul naso

È diffuso il metodo di modellare il ferretto direttamente sul naso: una volta messo in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore del dispositivo intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, modella il ferretto con una mano stringendolo con forza opportuna al centro fra due dita (indice all'interno) per la curvatura centrale. Esegui quindi le altre due pieghe attorno agli zigomi con l'altra mano

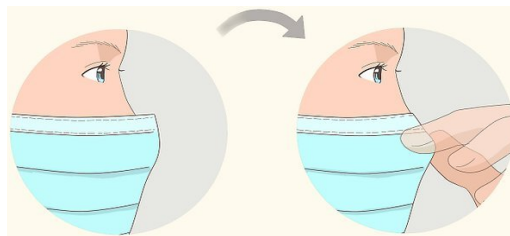

Punto 7 – Sistema il dispositivo sul mento

Una volta stabilizzato, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento

Limitazioni:

Ogni altro uso non indicato nel presente documento è vietato. Il fabbricante non risponde per eventuali danni per usi non indicati nel presente documento.